



## Hemostatická bariéra - mast

Před začátkem užívání přípravku, si pečlivě přečtěte tento návod na použití.

### 1. Co je Emofix® a k čemu se používá

Emofix® je hemostatická mast s ochrannou funkcí, určená k zabránění a prevenci kožních a slizničních krvácivých epizod, jako například krvácení z nosu vzniklé samovolně nebo vyvolané úrazem, malé kožní poranění atd.

### 2. Cemu musíte věnovat pozornost, než začnete Emofix® používat

Nepoužívejte tento přípravek, v případě známé přecitlivělosti na kteroukoliv jeho složku (uvedenou v bodě 6).

### 3. Jak se Emofix® používá

**K zabránění krvácivého stavu:** Naneste dostatečné množství masti, abyste pokryli poraněnou oblast.

**K prevenci opakování krvácení z nosu:** Nanášejte přípravek dvakrát denně alespoň 2 týdny po akutní epizodě krvácení nebo dle doporučení lékaře.

Použití aplikátoru, který je součástí balení, se doporučuje v případě aplikace na nosní sliznici.

Aplikátor po každém použití důkladně umyjte a nepoužívejte jej společně s nikým jiným.

### 4. Upozornění

- V případě nežádoucích účinků ukončete léčbu a konzultujte s lékařem.
- Během prvních dnů léčby se může objevit pálení, svědění nosu a rýma. Obvykle vymizí v průběhu léčby. Pokud příznaky neodezní, ukončete léčbu a konzultujte s lékařem.
- Nepoužívejte přípravek, pokud se zdá, že je originální obal porušený, nebo vykazuje známky neoprávněné manipulace ( např. přelepený obal). Neoprávněná manipulace a/nebo poškozený obal může ovlivnit bezpečnost přípravku.
- Nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby uvedené na obale. Datum expirace platí pouze v případě neporušeného a správně skladovaného přípravku.

### 5. Jak Emofix® uchovávat

- Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Po použití tubu pečlivě uzavřete.
- Uchovávejte při pokojové teplotě do 30 °C. Pokud je přípravek skladován při jiné teplotě, může měnit konzistenci, nesníží se však jeho kvalita. Pokud Emofix® necháte při pokojové teplotě, obnoví se opět jeho původní konzistence.

### 6. Další informace

**Složení:** směs nasycených mastných kyselin, extrakt kvasinkového proteinu, fosfatidylcholin, tokoferol acetát, včelí vosk, sójový olej, stearylalkohol, chlorid vápenatý, draselný, hořečnatý, glycerylmonostearát, metyl a propyl- p-hydroxybenzoát, BHT.

### Balení

Tuba 30 g s aplikátorem

Rev: 09/2019



**DMG Italia srl**

Via Laurentina, km 26,700

00071 Pomezia, Řím/Rome/Řím, Taliansko/Italy/Itálie

www.dmgit.com

### Distribútor pre SR:

Akacia, a.s., Športová 4, 903 01 Senec, Slovensko

**Výrobok určený na slovenský, český a maďarský trh.**

### Forgalmazó:

Akacia Pharma Kft., 1182 Budapest, Királyhágó u. 84.

**A magyar, szlovák és cseh piacra szánt termék.**

### Distributor pro ČR:

Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně 1 136/17, 150 00 Praha 5

**Přípravek je určený pro český, slovenský a maďarský trh.**

30 g e



0 3 7 3

