

Tyndaflor

vaginální výplach

5 jednorázových lahviček | 140 ml

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než začnete přípravek používat, protože obsahuje důležité údaje pro uživatele. Přípravek je zdravotnický prostředek, který není vázán na lékařský předpis. Aby bylo dosaženo úplné účinnosti přípravku, musí být použit přípravek v souladu s níže uvedenými pokyny. Uchovejte si návod k použití pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu nebo pro případné další konzultace. Další informace a rady vám poskytně váš lékař nebo lékárník.

SLOŽENÍ

ImmunoBlend - směs tyndalizovaných produktů fermentace (*Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Streptococcus Thermophilus*), kyselina mléčná, propylenglykol, kokoamfoacetát sodný, chlorhexidin diglukonát, fenoxylethanol, α -bisabolol, voda, parfém.

CO JE TYNDAFLOR

Přípravek TYNDAFLOR® vaginální výplach je zdravotnický prostředek ve formě nesterilního jednorázového roztoku pro intimní hygienu, který je vhodný pro podpůrnou léčbu příznaků spojených s vulvovaginitidou jakéhokoli původu, včetně HPV (lidský papilomavirus). Příznaky spojené s vulvovaginitidou zahrnují pálení, bolest, svědění, vaginální suchost, bolest při pohlavním styku, páliivu nebo řezavou bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí, bělavý hlenový výtok, zarudnutí a otok v oblasti zevních rodidel. Přípravek díky svému složení chrání vaginální sliznici a vytváří prostředí bránící množení patogenních mikroorganismů. Současně zklidňuje, ulevuje od svědění a upravuje vaginální pH.

INDIKACE


Vulvovaginitida je současný zánět pochvy (vagininitida) a zevních rodidel (vulvitida). Tento zánětlivý proces je spojen s různými příčinami, včetně infekcí, podráždění, hormonálních změn a poranění. Nejčastější příčiny vulvovaginálních příznaků jsou, v pořadí dle důležitosti: bakteriální vaginóza, vaginální kandidóza a vaginální infekce způsobené trichomonádami. Častou příčinou vulvovaginitidy jsou také virová onemocnění, jako je herpes virus (HSV typ 1 a 2) nebo infekce lidským papilomavirem (HPV).

ZPŮSOB A DOBA POUŽITÍ

TYNDAFLOR® vaginální výplach je hotový roztok, připravený k okamžitému použití. Doporučuje se používat jeden výplach denně po dobu minimálně 5 po sobě následujících dní, ideálně večer před spaním. Délka léčby závisí na vývoji příznaků. V případě potřeby používejte přípravek po delší dobu. Délka léčby by neměla překročit 30 dní.

POKyny K POUŽITÍ

Tento přípravek je určený k jednorázovému použití: aplikujte ihned po otevření lahvičky. Při každé jednotlivé aplikaci se doporučuje použít celý obsah lahvičky. Před použitím si důkladně umyjte ruce.

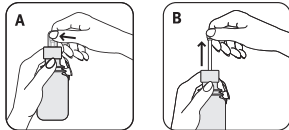

1. Před použitím lahvičku protřepejte.
2. Uchopte lahvičku za hrdlo a ohněte předem nařiznuté víčko zatlačením od stran, dokud nebude uzavěr zcela prolomený (viz obrázek A).

3. Vytáhněte aplikátor až na doraz tak, abyste cítili cvaknutí (viz obrázek B).

4. Jemně zaveďte aplikátor hluboko do pochvy.

5. Stisknutím lahvičky úplně vyprázdněte.

6. Osušte vnější povrch těla, neoplachujte.

Přípravek je doporučeno používat vsedě na bidetu, nebo vestoje ve vaně nebo ve sprše, se zvednutou nohou, čímž si usnadníte aplikaci. Pro zvýšení účinnosti přípravku se doporučuje provádět vaginální výplach vleže ve vaně.



UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

V případě, že použijete pouze část přípravku, nepoužívejte již znovu zbývající přípravek, protože by to mohlo způsobit infekci.

Nepodávejte injekčně. Nepolykejte. Při náhodném spolknutí přípravku se ihned obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu se doporučuje důkladně vymýt oči vlažnou vodou.

Funkčnost přípravku je zaručena pouze tehdy, když je obal neporušený. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, nebo pokud je obal při prvním otevření poškozený nebo porušený.

Dlouhodobé používání topických přípravků může vést k přecitlivělosti. V případě, že k tomu dojde, doporučuje se léčbu přerušit a poradit se s lékařem.

INTERAKCE

Dosud nejsou známy žádné interakce související s užíváním přípravku TYNDAFLOR® vaginální výplach.

KONTRAINDIKACE

Přípravek TYNDAFLOR® vaginální výplach nemá žádné specifické kontraindikace. Nepoužívejte přípravek při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku nebo nesnášenlivosti některé složky přípravku. Nebyly provedeny studie u těhotných ani kojících žen. V těchto případech se obraťte pro radu na svého lékaře.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při správném používání přípravku nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Je důležité, abyste případné nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v tomto návodu k použití, nahlásili svému lékaři nebo lékárníkovi.

25°C



UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte na chladném suchém místě, mimo přímé zdroje tepla a mimo přímé sluneční záření, při teplotě do 25 °C. Datum použitelnosti se vztahuje ke správně uchovávanému přípravku v neporušeném obalu. Po použití přípravek ani jeho obal nevyhazujte do volné přírody.

VELIKOST BALENÍ: 5 jednorázových lahviček po 140 ml.

DOBA POUŽITELNOSTI: 36 měsíců.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK € € 1370

Datum poslední revize: 07/2021



erbozeta
ENERGIA VERDE



Erbozeta S.p.A.
Strada delle Seriole, 41/43 - 47894 Chiesanuova
(Repubblica San Marino)
Erbozeta Austria GmbH
Graben 12, 1010 Vídeň (Rakousko)

Dovozce pro ČR:
Akacia Group, s.r.o.
Na Farkáně 136/17, 150 00 Praha 5
Česká republika

Společnost s certifikovaným systémem kvality
UNI CEI EN ISO 13485 pro zdravotnické prostředky.

Tyndaflor

vaginálny výplach

5 jednorazových flaštičiek | 140 ml

Prečítajte si prosím dôkladne tento návod na použitie skôr, ako začnete prípravok používať, pretože obsahuje dôležité údaje pre používateľov. Prípravok je zdravotnícka pomôcka, ktorá nie je viazaná na lekárske predpis. Pre dosiahnutie úplnej účinnosti prípravku, musí byť použitie prípravku v súlade s nižšie uvedenými pokynmi. Uschovajte si návod na použitie pre prípad, že si ho budete potrebovať prečítať znova alebo pre prípadné ďalšie konzultácie. Ďalšie informácie a rady vám poskytnie váš lekár alebo lekárnik.

ZLOŽENIE

ImmunoBlend - zmes tyndalizovaných produktov fermentácie (*Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Streptococcus thermophilus*), kyselina mliečna, propylénglykol, kokoamfoacetát sodný, chlórhexidíniumdiglukonát, fenoxetylanol, α -bisabolol, voda, parfum.

ČO JE TYNDAFLOR

Prípravok TYNDAFLOR® vaginálny výplach je zdravotnícka pomôcka, vo forme nesterilného jednorazového roztoku pre intímnu hygienu, ktorý je vhodný na podpornú liečbu príznakov spojených s vulvovaginitídou akéhokoľvek pôvodu, vrátane HPV (ľudský papilomavírus). Príznaky spojené s vulvovaginitídou zahŕňajú pálenie, bolesť, svrbenie, vaginálnu suchosť, bolesť pri pohlavnom styku, páliťú alebo rezavú bolesť vychádzajúcu z močovej trubice alebo jej okolia, belavý hlienový výtok, začervenanie a opuch v oblasti vonkajších rodidiel. Vďaka svojmu zloženiu chráni vaginálnu sliznicu a vytvára prostredie brániace množeniu patogénnych mikroorganizmov. Súčasne upokojuje, uľavuje od svrbenia a upravuje vaginálne pH.

INDIKÁCIE


Vulvovaginitída je súbežný zápal vagíny (vaginitída) a vonkajších rodidiel (vulvitída). Tento zápalový proces je spojený s rôznymi príčinami, vrátane infekcií, podráždenia, hormonálnych zmien a poranení. Najčastejšie príčiny vulvovaginálnych príznakov sú, v poradí podľa dôležitosti: bakteriálna vaginóza, vaginálna kandidóza a vaginálne infekcie spôsobené trichomonádami. Častou príčinou vulvovaginitídy sú tiež vírusové ochorenia, ako je herpes vírus (HSV typ 1 a 2) alebo infekcia ľudským papilomavírusom (HPV).

SPÔSOB A DOBA POUŽITIA

TYNDAFLOR® vaginálny výplach je hotový roztok, pripravený na okamžité použitie. Odporúča sa používať jeden výplach denne po dobu minimálne 5 po sebe nasledujúcich dní, ideálne večer pred spaním. Dĺžka liečby závisí od vývoja príznakov. V prípade potreby prípravok používajte dlhšiu dobu. Dĺžka liečby by nemala prekročiť 30 dní.

POKYNY NA POUŽITIE

Tento prípravok je určený na jednorazové použitie: aplikujte ihneď po otvorení flaštičky. Pri každej jednotlivjej aplikácii sa odporúča použiť celý obsah flaštičky. Pred použitím si dôkladne umyte ruky.

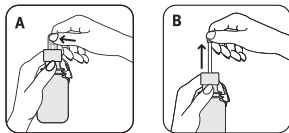

1. Pred použitím flaštičku pretrepte.
 2. Uchopte flaštičku za hrdlo a ohnite vopred narezaný uzáver zatlačením do strán, až kým sa uzáver úplne neprelomí (pozri obrázok A).
 3. Vytiahnite aplikátor až na doraz tak, aby ste cítili cvaknutie (pozri obrázok B).
 4. Jemne zaveďte aplikátor hlboko do pošvy.
 5. Stlačením flaštičky úplne vyprázdňte.
 6. Osušte vonkajšie partie, neoplachujte
- Prípravok je odporúčané používať sede na bidete, alebo postojacky vo vani alebo v sprche, so zdvihnutou nohou, čím si uľahčíte aplikáciu. Pre zvýšenie účinnosti prípravku sa odporúča vykonávať vaginálny výplach v lahu vo vani.



UPOZORNENIE

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

V prípade, že použijete iba časť prípravku, zvyšok prípravku opätovne nepoužívajte, pretože by to mohlo spôsobiť infekciu.

Nepodávajte injekčne. Neprehltajte. Pri náhodnom prehltnutí prípravku sa ihneď obráťte na svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu sa odporúča dôkladne vymyť oči vlažnou vodou.

Funkčnosť prípravku je zaručená len ak je obal neporušený. Nepoužívajte prípravok po dátume expirácie, alebo ak je obal pri prvom otvorení poškodený alebo porušený.

Dlhodobé používanie topických prípravkov môže viesť k precitlivosti. V prípade, že k tomu dôjde, odporúča sa prerušiť liečbu a poradiť sa s lekárom.

INTERAKCIE

Doteraz nie sú známe žiadne interakcie súvisiace s užívaním prípravku TYNDAFLOR® vaginálny výplach.

KONTRAINDIKÁCIE

Prípravok TYNDAFLOR® vaginálny výplach nemá žiadne špecifické kontraindikácie. Nepoužívajte prípravok pri známej precitlivosti na niektorú zložku prípravku alebo neznášanlivosti niektorej zložky prípravku.

Neboli vykonané štúdie u tehotných ani dojčiacich žien. V týchto prípadoch požiadajte o radu svojho lekára.

VEĎAJŠIE ÚČINKY

Pri správnom používaní prípravku neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Je dôležité, aby ste prípadné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, nahlásili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.



SKLADOVANIE

Uchovávajte na chladnom, suchom mieste, mimo priamych zdrojov tepla a mimo priameho slnečného žiarenia, pri teplote do 25 °C. Dátum expirácie sa vzťahuje na správne uchovávaný prípravok v neporušenom obale. Po použití prípravok ani jeho obal nevyhadzujte do voľnej prírody.

VEĽKOSŤ BALENIA: 5 jednorazových flaštičiek po 140 ml.

DOBA POUŽITELNOSTI: 36 mesiacov.

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE 1370

Dátum poslednej revízie: 07/2021



Erbozeta S.p.A.
Strada delle Seriole, 41/43 - 47894 Chiesanuova
(Repubblica San Marino)
Erbozeta Austria GmbH
Graben 12, 1010 Viedeň (Rakúsko)

Dovozca pre SR:
Akacia Group, s.r.o.
Na Farkáne 136/17, 150 00 Praha 5
Česká republika

Spoločnosť s certifikovaným systémom kvality
UNI CEI EN ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky